



**OSSENBERG**  
Qualität fest im Griff.

Ossenberg Vertriebs GmbH – Kanalstraße 79 – 48432 Rheine

## Gebrauchsanweisung

### für Ossenberg Teleskopstöcke in verschiedenen Ausführungen.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Haus Ossenberg entschieden haben. Unsere Teleskopstöcke werden aus technologisch hochwertigen Materialien gefertigt. Das Herzstück bildet ein millionenfach bewährter Drehverschluss: Er lässt sich öffnen, indem das Mittel- bzw. Unterteil maximal eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Zuerst das Unterteil sanft bis zum Anschlag herausziehen und im Uhrzeigersinn festdrehen. Dann mit dem Mittelteil Ihre persönliche Stocklänge einstellen und diese fixieren

Die einzelnen Segmente bitte nie über den Anschlag hinaus ziehen! Sollte dennoch einmal ein Segment herausrutschen, stecken Sie das Teilstück wieder in das verbliebene Rohr, drücken es kurz an, drehen zweimal im Uhrzeigersinn und der Stock ist wieder einsetzbar.

Beim Teleskopstock mit Rollspitze lässt sich diese bei Verschleiß einfach austauschen. Die alte Spitze mit einem kräftigen Ruck abziehen und die neue aufstecken. Sollte es mal nicht so einfach gehen, die Kunststoffhülse unter heißem Wasser erwärmen, dann lässt sie sich besser abziehen. Alle anderen Rollspitzen sind mit einem M8 Gewinde ausgestattet, die bei Verschleiß einfach gegen eine neue herausgedreht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass die Schlaufe nur zum Transport des Stockes dient. Bitte diese nie bei Benutzung des Stockes über das Handgelenk ziehen!

#### **Pflegehinweise:**

Den Stock niemals schmutzig oder nass zusammenschieben. Den Stock weiterhin nicht mit Schmierstoffen oder ähnlichem behandeln, da dann die Drehverschlüsse nicht mehr zuverlässig halten.

Sollten Sie wider Erwarten einmal Probleme mit Ihrem Stock haben, können Sie ihn bei uns gegen Erstattung der Material- und Versandkosten pflegen oder reparieren lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Teleskopstock.