



OSSEBERG

Qualität fest im Griff.

Ossenbergs Vertriebs GmbH – Kanalstraße 79 – 48432 Rheine

Gebrauchsanweisung

für Ossenbergs Langstöcke in verschiedenen Ausführungen, höhenverstellbar.

Gebrauchsanweisung

für Ossenbergs faltbare Langstöcke in verschiedenen Ausführungen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb einer unserer faltbaren Langstöcke.

Dieses Hilfsmittel ist von Blinden und Sehbehinderten gefertigt worden. Damit Sie Ihren neuen Stock möglichst lange nutzen können, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Das Zusammenlegen eines mehrteiligen Stockes sollte stets von unten aus erfolgen, um die Haltbarkeit des Gummizuges zu gewährleisten .
- Die Gummiringe der Kupplungsstücke müssen ab und zu mit Vaseline (fetthaltige Creme) eingefettet werden. Bitte kein Öl verwenden.
- Die kugelförmigen Tastspitzen sind aufgesteckt. Sie können bei Verschleiß ausgewechselt werden.

Ersatzspitzen können Sie in unserem Hause erwerben. Beim Austausch der Tastspitzen ziehen Sie diese bitte mit einer Drehbewegung ab.

Sollten Sie wider Erwarten einmal Probleme mit Ihrem Stock haben, können Sie ihn bei uns gegen Erstattung der Material- und Versandkosten pflegen oder reparieren lassen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen faltbaren Langstock.

Ihr Team Ossenbergs