



OSSENBERG
Qualität fest im Griff.

Osseberg Vertriebs GmbH – Kanalstraße 79 – 48432 Rheine

Gebrauchsanweisung

für Osseberg faltbare Gehstöcke in verschiedenen Ausführungen, höhenverstellbar.

Der Faltstock wird in einem Klarsicht-Kunststoffetui geliefert, welches als Verkaufsverpackung und als Aufbewahrungsmöglichkeit dient.

Sie können auch eine elegante Ledertasche (Artikel-Nr.157) in Schwarz und Rot für die Reisetöcke als Zubehör bekommen.

Für den Transport in der Handtasche können Sie den Stock auch mit einem Haushaltsgummi zusammenhalten.

Bitte nehmen Sie den Stock im gefalteten Zustand aus der Hülle, indem Sie die Rohrteile mit der Hand umschließen. Danach können Sie den Stock Stück für Stück langsam entfalten, der innenliegende Gummizug sorgt dafür, dass sich die einzelnen Teile ineinander zusammenfügen. Bitte halten Sie den Faltstock für diesen Vorgang immer in der Mitte des jeweiligen Rohrteiles fest.

Wenn genügend Platz vorhanden ist, können Sie auch die Selbst-Entfaltung des Stockes nutzen: Einfach den Stock im gefaltetem Zustand aus der Hülle nehmen. Den Stock am Griff mit einer Hand und ausgestrecktem Arm vom Körper weghalten. Die Rohrteile nicht mehr mit der Hand zusammenhalten bzw. Gummiband, sofern vorhanden, entfernen. Die Rohrteile entfalten sich durch den innenliegenden Gummizug von selbst. Bitte prüfen Sie, dass alle Rohrteile gut ineinandergefügt sind.

Die Höhenverstellung erfolgt durch Druckknopfsystem:

Die Faltstöcke sind 5-fach höhenverstellbar in 2 cm Abständen, d.h., man kann die Gesamtlänge um insgesamt 10 cm verstellen. Bitte drücken Sie dazu den Druckknopf nach innen und ziehen Sie das obere Teil des Stocks nach oben – für längere Einstellung, oder schieben Sie es nach unten – für kürzere Einstellungen. Bei dem Loch, bei dem die gewünschte Höhe fixiert werden soll, lassen Sie den Druckknopf wieder einrasten. Falls der Druckknopf „verschwunden“ ist, kommt er durch leichtes Drehen und Hin- und Herschieben des Rohres wieder zum Vorschein.

Für das Zusammenfalten des Stockes beginnen Sie an einem Ende: Halten Sie ein Rohrteil mit der einen Hand fest, ziehen Sie das nächste Rohrteil mit der anderen Hand heraus und legen Sie beide Teile zusammen. Dann umschließen Sie bitte die zusammengelegten Teile mit der Hand und ziehen das nächste Rohrteil heraus und falten es zusammen. So falten Sie Teil für Teil den Stock zusammen.

Bitte halten Sie die Rohrteile dabei immer in der Mitte fest, nicht an den Enden.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie mit einer Hand immer die bereits zusammengelegten Teile festhalten, damit sich der Stock nicht ungewollt wieder entfalten kann.

Dann können Sie den Stock im gefalteten Zustand wieder in die Hülle packen oder mit einem Haushaltsgummi zusammenhalten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Faltstock.